



FreeStyle



Guía de Aplicación



SELECCIÓN DE UN SITIO PARA EL SENSOR

CUANDO SELECCIONE EL SITIO PARA APLICAR EL SENSOR, RECUERDE LOS SIGUIENTES PASOS:



- Seleccione un área en **la parte posterior y superior del brazo** que generalmente se mantenga quieta (que no se doble ni pliegue).
- Elija un lugar que esté, al menos, a 1 pulgada (2.5 cm) **de distancia de una zona de administración de insulina**.
- **Seleccione un sitio distinto del que utilizó más recientemente** para evitar molestias o irritación en la piel.
- Asegúrese de que el sitio esté **completamente afeitado** para evitar que los vellos interfieran en el sensor.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PIEL

PARA PREPARAR EL SITIO Y LOGRAR UNA ADHESIÓN ÓPTIMA:



- 1. LAVADO** Solo utilice jabón **no humectante y sin fragancia** para lavar la zona donde aplicará el sensor.
- 2. LIMPIEZA** Utilice la toallita con alcohol proporcionada en el kit del sensor para **eliminar cualquier residuo oleoso**.
- 3. SECADO** **Deje que su piel se seque por completo** antes de aplicar el sensor. Esto es especialmente importante si planea aplicar el sensor después de ducharse o de nadar.

RECORDATORIOS SOBRE ELEMENTOS QUE NO DEBEN ENCONTRARSE ENTRE EL SENSOR Y SU PIEL:



- Humedad de cualquier tipo.
- Vellos. Considere afeitarse el área de aplicación.
- Residuos oleosos de jabón, emulsión, shampoo o acondicionador.

PREPARACIÓN DEL SENSOR

SIEMPRE PREPARE EL SENSOR CONTRA UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y PLANA.



- **Retire la cubierta** del paquete del sensor y **desenrosque la tapa** del aplicador del sensor.
- **Alinee las marcas** en el aplicador y el paquete del sensor. Presione firmemente el aplicador del sensor hasta que se detenga.
- **Levante el aplicador del sensor** para sacarlo del paquete del sensor. El aplicador del sensor está listo para la aplicación.

ADVERTENCIA: El aplicador del sensor ahora contendrá una aguja. No toque el interior del aplicador del sensor ni vuelva a colocarlo dentro del paquete del sensor. NOTA: El paquete del sensor y los códigos del aplicador del sensor deben coincidir, de lo contrario, las lecturas de glucosa pueden ser imprecisas.

APLICACIÓN DEL SENSOR

SIGA ESTOS PASOS CUANDO APLIQUE EL SENSOR.



- Coloque el aplicador del sensor sobre el sitio de aplicación, **presione firmemente** y mantenga la presión durante unos segundos.
- **Retire suavemente** de su cuerpo el aplicador del sensor.
- **Asegúrese de que el sensor esté fijo** presionando el sensor hacia abajo y deslizando su dedo por el adhesivo del sensor.

PRODUCTOS QUE FACILITAN EL RETIRO DEL SENSOR*

EL USO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES HUMECTANTES PUEDE FACILITAR EL RETIRO DEL SENSOR*.

ACEITE PARA BEBÉS

Un humectante suave.

REMOVEDOR DE ADHESIVOS REMOVE™

Elimina los residuos de adhesivos en la piel.

REMOVEDOR DE ADHESIVOS UNI-SOLVE™

Formulado para reducir las lesiones provocadas por adhesivos en la piel, ya que disuelve completamente los adhesivos de la cinta para vendajes y de dispositivos.



Estamos aquí para ayudarlo. Para obtener más ayuda con la aplicación del sensor, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Abbott llamando al 1-855-632-8658.



* La siguiente información no constituye una aprobación del fabricante ni de la calidad del producto. Abbott Diabetes Care no asume la responsabilidad de la integridad o la precisión de la información del producto. La disponibilidad del producto puede variar según el país y la región. Se deben seguir las instrucciones de uso del fabricante de cada producto.

Indicaciones e Información Importante de Seguridad

Sistema FreeStyle Libre de 14 días: Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre de 14 días según las instrucciones en el etiquetado, se puede evitar la detección un evento grave de niveles de glucosa bajos o altos o no tomar una decisión sobre el tratamiento, lo que puede provocar daños. Si las lecturas no coinciden con los síntomas o con los resultados previstos, utilice el valor indicado por un glucómetro mediante una punción en el dedo para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o comuníquese con Abbott llamando al 855-632-8658 o visite <https://www.FreeStyle.abbott/us-en/safety-information.html> para obtener información de seguridad.

Sistema FreeStyle Libre 2: Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre 2 según las instrucciones en el etiquetado, se puede evitar la detección un evento grave de niveles de glucosa bajos o altos o no tomar una decisión sobre el tratamiento, lo que puede provocar daños. Si las alertas y las lecturas de glucosa no coinciden con los síntomas o con los resultados previstos, utilice el valor indicado por un glucómetro mediante una punción en el dedo para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o comuníquese con Abbott al llamando 855-632-8658 o visite <https://www.FreeStyle.abbott/us-en/safety-information.html> para obtener información de seguridad.

La forma circular de la carcasa del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas de identificación relacionadas son marcas de Abbott. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.